



STÅSEJL med 2 bæltter

Et unikt ståsejl, som støtter brugeren ved brug af mobil ståløfter.

ANVENDELSE

- Anvendes til brugere med standfunktion og en god kropskontrol.
- Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile ståløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol.
- Sejlet har elastik i ryggen, hvilket giver en god pasform og støtte omkring ryggen. Derved får brugeren en følelse af tryk under løftet og i standfunktionen.
- Sejlet med 2 bæltter kan tilpasses brugere med en stor mave, idet bæltet kan spændes over og under maven.
- Ståsejlet har anti-skrid på indersiden. Det sikrer, at sejlet ikke glider op under løft.
- Sejlet har polstring under armene.
- Sejlet har stofoverslag, som er forsynet med velcro og det lukkes til med et spænde.

SPECIFIKATIONER

SWL: 250 kg

Materiale:
Polyester

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:
Ståsejl med to bæltter,
polyester:

| | Varenr. | HMI-nr. |
|------------|-----------|---------|
| XS | 009-09563 | 72874 |
| S | 009-09564 | 72875 |
| M | 009-09565 | 72876 |
| L | 009-09566 | 72877 |
| XL | 009-09567 | 72878 |
| XXL | 009-09568 | 72879 |




STØRRELSESGUIDE

Sejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabelen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

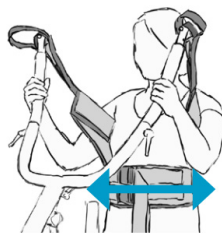

| | S | M | L | XL | XXL |
|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Mavemål | 66 – 90 cm | 80 – 100 cm | 100 – 126 cm | 110 – 132 cm | 120 – 140 cm |



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE