

CAREWAVE PLUS

POZ 'in' FORM PLUS

Manuel Technique
CAREWAVE PLUS
POZ IN FORM PLUS

TM_PAID_FR

TABLE DES MATIÈRES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF	- 3 -
ACCESSOIRES DE PROTECTION COMPATIBLES	- 3 -
PRECAUTIONS D'EMPLOI	- 4 -
MAINTENANCE PREVENTIVE	- 5 -
ENTRETIEN ET DESINFECTION	- 5 -
Nettoyage du coussin CAREWAVE PLUS (sans housse de protection)	- 5 -
Nettoyage du coussin POZ IN FORM PLUS (sans housse de protection)	- 6 -
Nettoyage des housses PROMUST PU HD	- 6 -
Nettoyage des housses LENZING	- 6 -
Nettoyage des housses PROMUST CIC	- 6 -
Nettoyage du coussin avec housse de protection	- 6 -
ELIMINATION	- 6 -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques (CAREWAVE PLUS)	
Microbilles	Polystyrène expansé 100% (17 g/L)
Poche polyester	100% polyester, grammage 85 g/m ²
Housse PROMUST PU HD	52% polyuréthane, 48% polyester, grammage 210 g/m ²
Poche PROMUST CIC	44% polyuréthane, 56% polyester, grammage 225 g/m ²
Housse LENZING	52% viscose, 48% lyocell, film 100% polyuréthane, grammage 160 g/m ²
Test de résistance au feu	EN 12952-1 & EN 12952-2

Caractéristiques techniques (POZ IN FORM PLUS)	
Fibres	Polyester 100%
Poche polyester	100% polyester, grammage 85 g/m ²
Housse PROMUST PU HD	50% polyuréthane, 59% polyester, grammage 200 g/m ²
Housse LENZING	52% viscose, 48% lyocell, film 100% polyuréthane, grammage 160 g/m ²
Test de résistance au feu	EN 12952-1 & EN 12952-2

ACCESSOIRES DE PROTECTION COMPATIBLES

REFERENCES	CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (L x l x e)*
CAREWAVE PLUS	
VHCAR01	45 x 30 x 10 cm
VHCAR02	55 x 40 x 12 cm
VHCAR03	45 x 20 x 8 cm
VHCAR04	50 x 45 x 10 cm
VHCAR05	60 x 35 x 10 cm
VHCAR06	60 x 20 (diameter) cm
VHCAR07	45 x 12 (diameter) cm
VHCAR08	40 x 20 x 9 cm
VHCAR09	180 x 55 x 15 cm
VHCAR10	170 x 55 x 15 cm
VHCAR11	130 x 80 x 20 cm
VHCAR12	60 x 30 x 30 cm
VHCAR13	45 x 25 x 25 cm
VHCAR14	70 x 50 x 10 cm
VHCAR15	80 x 20 x 15 cm
VHCAR17	38 x 30 x 12 cm
POZ IN FORM PLUS	

VHPOZ01	45 x 30 x 15 cm
VHPOZ02	55 x 40 x 15 cm
VHPOZ03	45 x 20 x 10 cm
VHPOZ04	50 x 45 x 15 cm
VHPOZ05	60 x 35 x 15 cm
VHPOZ06	60 x 20 (diamètre) cm
VHPOZ07	45 x 12 (diamètre) cm
VHPOZ08	40 x 20 x 12 cm
VHPOZ09	180 x 55 x 15 cm
VHPOZ10	170 x 55 x 15 cm
VHPOZ11	130 x 80 x 20 cm
VHPOZ12	60 x 30 x 30 cm
VHPOZ13	45 x 25 x 25 cm
VHPOZ14	70 x 50 x 15 cm
VHPOZ15	80 x 20 x 15 cm
VHPOZ16	50 x 40 x 10 cm
VHPOZ17	38 x 30 x 16 cm

*L = longueur ; l = largeur ; e = épaisseur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Vérifier manuellement l'inclinaison de la colonne vertébrale/l'alignement du bassin et le retrait du support trochantérien. La surface du lit est horizontale.
- En cas d'escarre/blessure établie (à partir du stade 1), éviter le contact direct avec le dispositif.
- En cas d'agitation/confusion du patient et/ou de non-conformité, utilisez le coussin circulaire.

Les avertissements suivants s'appliquent :

- À chaque changement de position, observer l'aspect de la peau en contact direct avec la surface du dispositif (intérieur des genoux, talons, malléoles en cas de rotation externe d'un membre inférieur, etc.)
- A chaque changement de position du patient en position semi-latérale à 30°, rechercher une rougeur sur le bord externe et la malléole du pied en contact avec le matelas, et sur l'oreille en contact avec l'aide technique.
- Hypersudation sur les zones en contact direct et prolongé avec la surface de l'enveloppe (interface serviette).

Les mesures à prendre sont les suivantes :

- Lire les recommandations du fabricant du matelas simple ou du matelas thérapeutique concernant l'utilisation de ces produits associés.
- Si nécessaire, vérifier que la hauteur des barrières du lit est compatible avec l'épaisseur du matelas ou du surmatelas (au moins 22 cm entre le haut du matelas et le haut des

barrières) et que les parties du corps positionnées ne sont pas en contact avec les éléments structurels du lit médicalisé et de ses accessoires.

- Limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le support, à l'exception d'une housse de confort compatible avec les dispositifs de positionnement, du vêtement de corps et d'un éventuel linge complet. Préférez les vêtements de corps en coton qui ne sont pas trop serrés et, si possible, sans coutures dans la zone de soutien.
- S'assurer de l'absence de corps étrangers (tubulures, miettes, graisse, etc.) avant de positionner la personne.
- Important : consultez votre prescripteur dans le mois qui suit l'acquisition de ces dispositifs de décharge ou systèmes de positionnement.
- Observer plusieurs fois par jour l'état de la peau du patient en contact avec le support.
- Utiliser des dispositifs de décharge ou des systèmes de positionnement sur un patient présentant une escarre/blessure.
- Changer de position au moins toutes les 8 heures sur un support à air motorisé à pression alternée, toutes les 4 heures sur un matelas en mousse viscoélastique, et toutes les 2 à 3 heures sur tous les autres.
- Surveillance renforcée chez les sujets à risque de chute (profil du patient : invalide, agité, non lucide).

Veillez noter qu'il ne suffit pas de changer la position du patient pour prévenir les escarres/blessures. D'autres mesures préventives sont également essentielles :

- Utiliser un matelas thérapeutique adapté au risque, à la mobilité et à l'activité du patient,
- Maintenir l'hygiène de la peau et éviter la macération,
- En cas d'incontinence, changer régulièrement les protections,
- Observer quotidiennement l'état de la peau ou demander à quelqu'un de le faire pour vous,
- Veiller à une alimentation suffisante et adaptée, et boire régulièrement et en quantité suffisante.

Si l'une de ces mesures ne peut être respectée, il est essentiel d'en informer votre médecin ou votre infirmière le plus rapidement possible.

MAINTENANCE PREVENTIVE

Effectuer régulièrement des contrôles visuels de l'état de l'enveloppe. La présence de trous, de déchirures ou l'apparition de microbilles/fibres à travers la soudure rend le dispositif non conforme.

ENTRETIEN ET DESINFECTION

NETTOYAGE DU COUSSIN CAREWAVE PLUS (SANS HOUSSE DE PROTECTION)

				
Ne pas laisser tremper. Laver à la main et rincer rapidement	Blanchiment interdit	Repassage exclu	Ne pas nettoyer à sec	Séchage avec contrainte thermique (60°C)

NETTOYAGE DU COUSSIN POZ IN FORM PLUS (SANS HOUSSE DE PROTECTION)

				
Lavage modéré jusqu'à 40°C	Blanchiment interdit	Repassage exclu	Ne pas nettoyer à sec	Séchage en tambour interdit

NETTOYAGE DES HOUSSES PROMUST PU HD

				
Lavage modéré jusqu'à 90°C	Concentration maximale de chlore autorisée de 5000ppm	Repassage exclu	Ne pas nettoyer à sec	Séchage avec contrainte thermique possible (60°C)

NETTOYAGE DES HOUSSES LENZING

				
Lavage modéré jusqu'à 60°C	Blanchiment interdit	Repassage exclu	Ne pas nettoyer à sec	Séchage avec contrainte thermique possible (60°C)

NETTOYAGE DES HOUSSES PROMUST CIC

		
Concentration maximale de chlore autorisée de 5000ppm	Repassage exclu	Ne pas nettoyer à sec

NETTOYAGE DU COUSSIN AVEC HOUSSE DE PROTECTION

Nettoyage de surface par produits détergents et/ou désinfectant de surface soumis au statut de marquage CE et/ou biocide selon le règlement (UE) n°528/2012.

ELIMINATION

Ne jetez pas le produit dans l'environnement autrement que dans les zones prévues à cet effet. Suivez les procédures de recyclage en vigueur dans votre pays.



WINNCARE France
4, Le Pas du Château
85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT
FRANCE



WINNCARE France
Zone Actipole
2 Rue de Saint-Coulban
35590 MINIAC-MORVAN – France



Tél. : +33 (0)4.66.02.15.15
Fax. : +33 (0)4.66.02.15.00
Email: contact@winncafe.fr
www.winncafe.com